

# Angiologie dont IVC 13.03.25

## Moyens de contention



# Bauerfeind – qualité fabriqué en Allemagne



De l'idée à la production



Depuis 37 ans en Suisse dans le canton d'Aarau

# Notre gamme – Domaines de compétences



**Bandages actifs**



**Orthèses de stabilisation**



**Semelles viscoélastique**



**Bas de compression médicale**

# La maladie veineuse – La classification CEAP



**C1 : Varicosités, varices reticulaires**



**C2 : Varices**



**C3 : Œdème veineux**



**C4 : Altérations cutanées**



**C5 : Ulcère veineux guéri**



**C6 : Ulcère veineux ouvert**

# La prescription médicale



Les quatre informations...

1. Indication
2. Bas en série ou bas sur mesure
3. Modèle
4. Classe de compression

...déterminent le numéro de la position LiMA dont les assurances maladie ont besoin.

## PRESCRIPTION MÉDICALE

**Bas / Collants de compression médicaux à maillage circulaire**

**Patient(e)** \_\_\_\_\_  
 Nom Prénom Date de naissance

**Indication** \_\_\_\_\_

**Utilisation**  Bas standard / en série  Bas sur mesure

---

**Modèle**

<input type="checkbox"/> Bas mollet  <b>AD</b> <input type="checkbox"/> CCL 1 <input checked="" type="checkbox"/> CCL 2 <input type="checkbox"/> CCL 3 <input checked="" type="checkbox"/> CCL 4	<input type="checkbox"/> Bas cuisse  <b>AG</b> <input type="checkbox"/> CCL 1 <input type="checkbox"/> CCL 2 <input type="checkbox"/> CCL 3 <input type="checkbox"/> CCL 4	<input type="checkbox"/> Collant  <b>AT</b> <input type="checkbox"/> CCL 1 <input type="checkbox"/> CCL 2 <input type="checkbox"/> CCL 3 <input type="checkbox"/> CCL 4
<input type="checkbox"/> Collant maternité  <b>ATU</b> <input type="checkbox"/> CCL 1 <input type="checkbox"/> CCL 2 <input type="checkbox"/> CCL 3 <input type="checkbox"/> CCL 4	<input type="checkbox"/> Bas cuisse fixation à la hanche  <b>AGHB</b> <input type="checkbox"/> CCL 1 <input type="checkbox"/> CCL 2 <input type="checkbox"/> CCL 3 <input type="checkbox"/> CCL 4	

Nombre paire(s) \_\_\_\_\_ Nombre de pièce(s) \_\_\_\_\_

Kit ulcère veineux  
  
 Nombre de kits \_\_\_\_\_

**DISPOSITIFS D'AIDE À LA MISE EN PLACE**

Gants en caoutchouc spéciaux

Aide au glissement  Motif : le / la patient(e) n'est pas en mesure de mettre ou d'enlever ses bas de compression seul(e).

Cadre / manchette circulaire  Motif : le / la patient(e) ne peut pas utiliser l'aide au glissement en raison d'une mobilité réduite.

Prescription de produits de marque : \_\_\_\_\_

Motif : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nom du médecin / Numéro RCC :

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Signature du médecin

**Remarque à destination du patient/de la patiente**  
 Le patient / la patiente n'est pas tenu(e) d'acheter des produits Bauerfeind. Le patient / la patiente décide librement quels moyens auxiliaires acheter et auprès de quel point de remise. Si pour des raisons médicales le médecin a nommément inscrit un produit dans la prescription, le point de remise ne peut modifier le produit qu'après concertation avec le médecin traitant.

# Limitations en vertu de la LiMA



<b>BCM à maillage circulaire de classe 2</b> 23–32 mmHg	<b>BCM à maillage circulaire de classe 2</b> 23–32 mmHg	<b>BCM à maillage circulaire de classe 3 et 4</b> > 34 mmHg	<b>Système de bas de compression pour le traitement de l'ulcère veineux</b> 1 ensemble comprenant 1 bas et 2 parties inférieures
<b>Indications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisation postopératoire après intervention orthopédique</li> <li>Utilisation postopératoire après intervention au niveau des ganglions lymphatiques</li> </ul>	<b>Indications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Syndrome douloureux des membres inférieurs d'origine veineuse (stades C1, C2, C3 d'après la classification CEAP)</li> <li>Insuffisance veineuse chronique aux stades avancés (C3, C4a, C4b, C5, C6)</li> <li>Lymphoedème stade 1</li> <li>Oedème d'origine cardiogène ou autres oedèmes ayant une cause internistique</li> <li>Oedème causé par l'inactivité</li> <li>Oedème posttraumatique</li> </ul>	<b>Indications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Insuffisance veineuse chronique dans les stades avancés (C3, C4a, C4b, C5, C6)</li> </ul>	<b>Indications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ulcère veineux (stade C6)</li> <li>Insuffisance veineuse chronique, stade C5, lorsqu'un état cutané particulièrement vulnérable l'exige et que des bas médicaux de contention (selon les chapitres 17.02 à 17.03) ne peuvent pas être utilisés</li> </ul>
<b>Limitation</b> 1 paire de bas de compression par an* au maximum.	<b>Limitation</b> 2 paires de bas de compression par an* au maximum. En cas d'utilisation unilatérale et utilisation de collants: 2 pièces par an au maximum. Maximum 2 paires de bas de compression par an*.		<b>Limitation</b> 2 ensembles par jambe atteinte et par année*.
<b>À maillage circulaire, sur mesure:</b> prise en charge uniquement s'il est impossible de fournir un bas issu de la fabrication en série via un écart au niveau d'un point de mesure au minimum.			

<https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html>





## Contre-indications

- Maladie artérielle occlusive périphérique en stade avancé (si l'un de ces paramètres s'applique ABPI < 0,5, pression systolique à la cheville < 60 mmHg, pression des orteils < 30 mmHg ou TcPO<sub>2</sub> < 20 mmHg dos du pied)
- Insuffisance cardiaque décompensée (NYHA III + IV)
- Phlébite septique
- Phlébite bleue (Phlegmatia Coerulea Dolens)

Dans les cas suivants, il faudra choisir le traitement en pesant les bénéfices et les risques et sélectionner le moyen de compression le mieux adapté :

- Dermatoses suintantes prononcées
- Intolérance à la matière de compression
- Troubles aigus de la sensibilité des membres inférieurs
- Neuropathie périphérique avancée (par ex., en cas de diabète sucré).
- Polyarthrite chronique primaire

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des nuisances provoquées par le non-respect de ces contre-indications et la responsabilité du fait des produits est alors exclue.

# Modèles courants



La longueur du modèle dépend de l'indication et la localisation des signes cliniques et pathologiques\*



## Bas mollet

- Changements pathologiques dans la jambe inférieure
- Œdème de la jambe inférieure
- Changements cutanées dans l'insuffisance veineuse
- Ulcère veineux



## Collant

- La partie du corps sert de confort de port



## Bas cuisse

- Œdème au-dessus du genou
- Thrombose veineuse profonde dans la cuisse
- Varices dans la cuisse



## Collant maternité

- Alternative au bas de cuisse pour l'œdème et les varices sur la cuisse
- La partie du corps sert de confort et est très élastique

**Attention: Le bord supérieur du bas ne doit jamais comprimer au milieu d'une varice.**

# Concept de prise en charge - VenoTrain®



Recommandations de produits selon la classe de compression et l'élasticité

Diagnostic	Pas de signes cliniques visibles mais par ex. les jambes lourdes	Varices réticulaires	Varicosités / Varices	Oedème Oedème veineux, Oedème post-traumatique, Oedème de grossesse	Altérations cutanées dues à une insuffisance veineuse (Dermatolipodystrophie, atrophie blanche, pigmentation, eczéma)	Ulcère veineux guéri	Ulcère veineux ouvert
Classification-CEAP <sup>1</sup>	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Douleurs / problèmes	Troubles faibles				Troubles importants		
Recommandations de produits							
Classe de compression (pression au repos)	Ccl 1 18 – 21 mmHg		Ccl 2 23 – 32 mmHg		Ccl 3 34 – 46 mmHg		
Système de détermination de tailles	PERFECT-FIT			V6+		X5+	
Elasticité							
	pas hautement élastiques avec une grande capacité d'adaptation				pas peu élastiques avec une pression thérapeutique		

<sup>1</sup> Lurie F. et al. The 2020 update of the CEAP classification system and reporting standards. J Vasc Surg Venous Lymphat Disord, 2020;8(3):342-52.


# Classe de compression et compression dégressive



Quand les symptômes sont prononcés, une classe de compression plus élevée est nécessaire. Selon ordonnance du médecin.



Pression effective	Classe de compression
18 – 21 mmHg	Ccl 1*
23 – 32 mmHg	Ccl 2
34 – 46 mmHg	Ccl 3

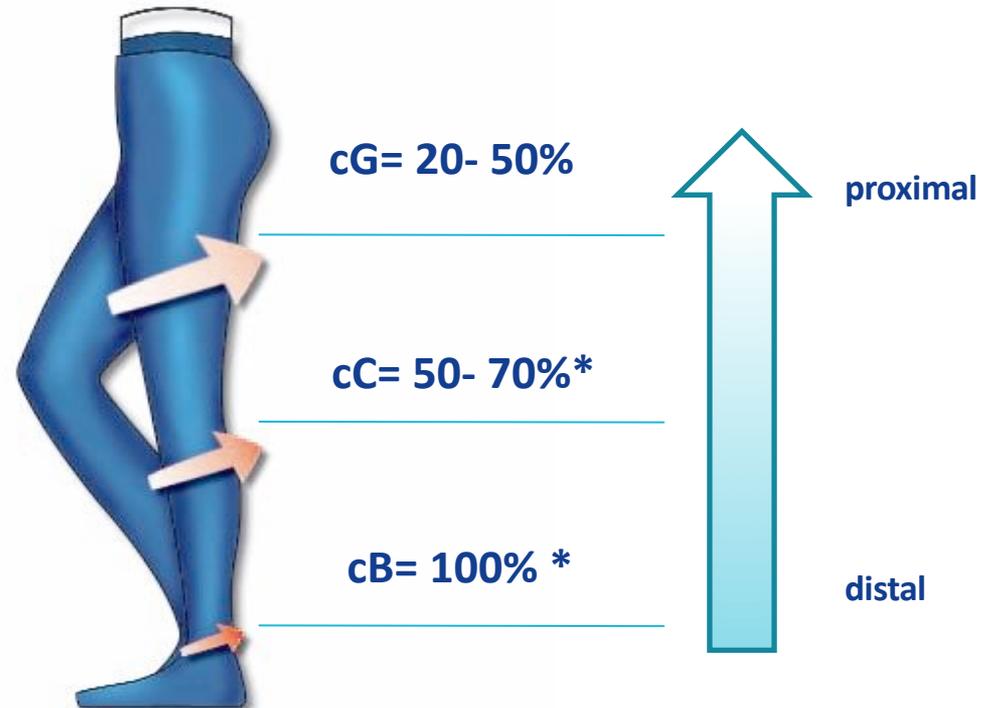

# Comparaison de tricot



## Tricot „classic“


(Pull, chaussette, collant...)

De sorte que l'élasticité dans la longueur et largeur est identique

## Tricot compressif

Utilisation d'un fil supplémentaire: Le fil de trame

Tricot circulaire ou à plat – en spirale autour de la jambe nécessaire pour produire la pression de compression lors de l'étirement du tissu

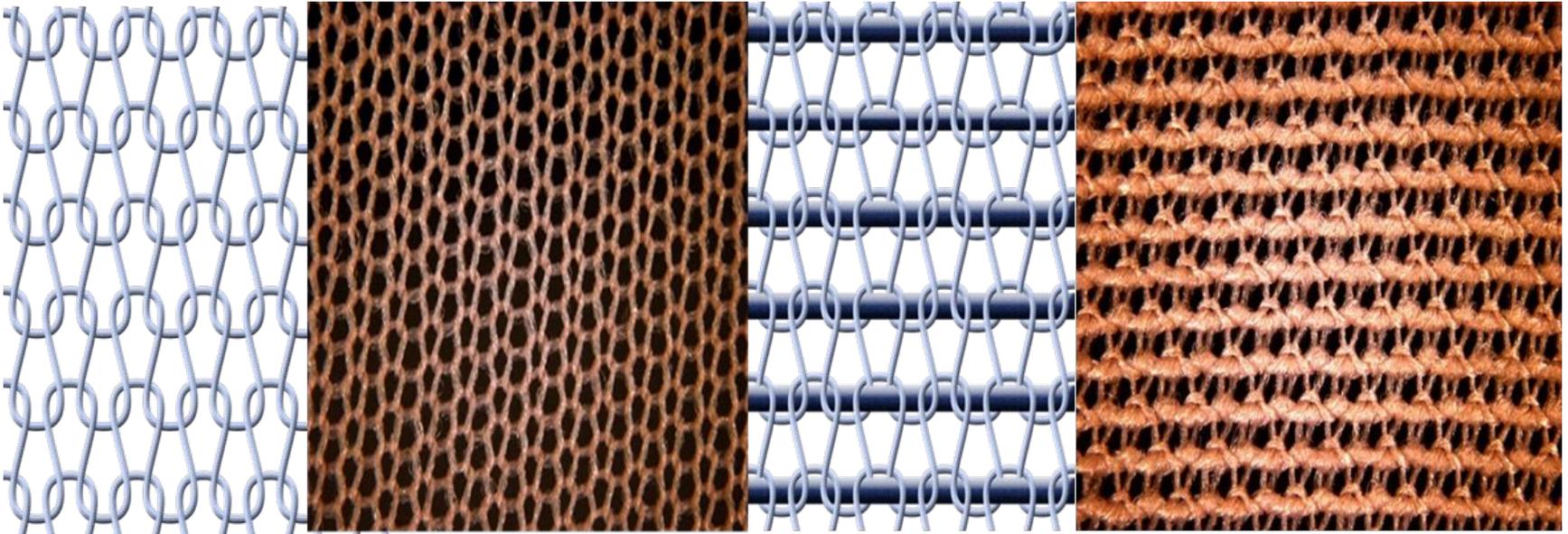

# Les points de mesure





Produits en série = Taille standard S, M,L, XL

## Mesure de la circonférence

- cB** Circonférence la plus petite au niveau de la cheville au-dessus de la malléole externe
- cC** Circonférence la plus grande du mollet
- cD** Circonférence deux doigts en dessous du creux du genou
- cG** Circonférence de la partie la plus large de la cuisse, sous le pli fessier

## Mesure de la longueur

**ID, IG** Les mesures de la longueur sont prises **verticalement**, du sol jusqu'au point de mesure correspondant

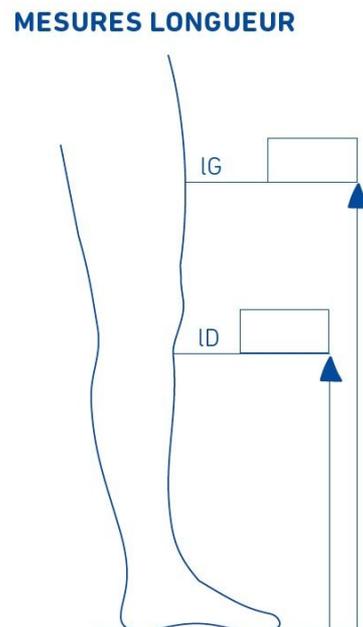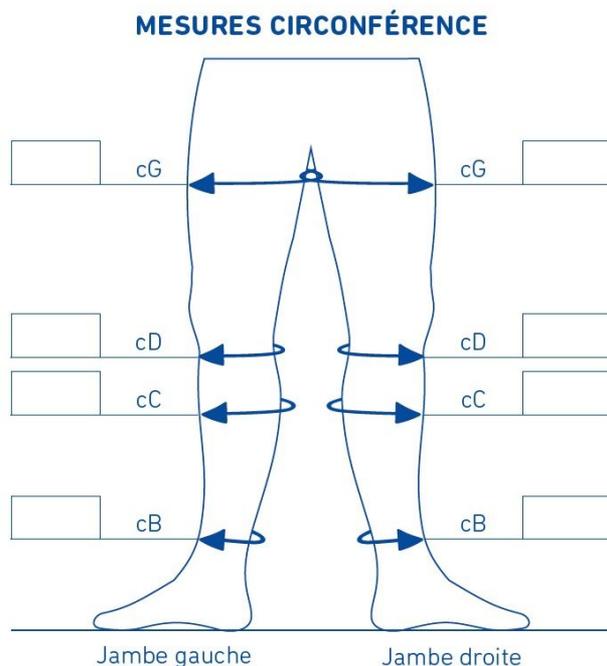

**Pour VenoTrain® business, VenoTrain® cocoon**

- Taille de pied :**  foot short (pointure 36 – 41)  
 foot long (pointure 41 – 46)

## PERFECT-FIT TABLEAU DES TAILLES STANDARD

VenoTrain® micro | VenoTrain® business

VenoTrain® soft | VenoTrain® soft S | VenoTrain® cocoon | VenoTrain® pure

BAUERFEIND.CH

Circonférence	XS*	S		M		L		XL	
	Normal	Normal	Plus	Normal	Plus	Normal	Plus	Normal	Plus
cT		à 85		à 90		à 100		à 120	
cH		à 95		à 105		à 120		à 140	
cG Bande de fixation large**		51-57	59-66	56-63	62-69	60-67	66-74	63-71	71-80
cG Bande de fixation normale	44-50	45-51	52-59	49-56	55-62	53-60	58-66	55-63	62-71
<b>cG Standard*</b>	<b>44-50</b>	<b>45-57</b>	<b>52-66</b>	<b>49-63</b>	<b>55-69</b>	<b>53-67</b>	<b>58-74</b>	<b>55-71</b>	<b>62-80</b>
cF	39-50	40-52	43-55	43-55	46-60	45-59	50-64	49-63	52-68
cE	32-38	33-40	36-44	35-43	39-49	38-48	42-53	42-53	47-58
cD	<b>28-31</b>	<b>29-35</b>	<b>32-38</b>	<b>32-38</b>	<b>35-42</b>	<b>34-42</b>	<b>37-45</b>	<b>37-45</b>	<b>41-49</b>
cC	<b>29-33</b>	<b>31-37</b>	<b>34-40</b>	<b>34-40</b>	<b>37-44</b>	<b>37-45</b>	<b>39-47</b>	<b>40-48</b>	<b>43-51</b>
cB1	23-26	25-29	27-31	27-32	29-34	29-35	31-37	32-38	34-40
cB	<b>18-20</b>	<b>20-22</b>		<b>22-25</b>		<b>25-28</b>		<b>28-31</b>	
cY	27-31	29-33		31-35		34-40		37-44	
cA	17-22	19-24		22-27		25-31		28-35	

Système de taille en cm

Longueur	short	long	Modèle
LG	61-70	70-80	AG, AT
LD	35-40	40-46	AD

### Foot short et Foot long

(Pour le VenoTrain® business et VenoTrain® cocoon)

Pointure 36-41

**foot short**

Pointure 41-46

**foot long**

- \* programme de livraison limité pour la taille XS
- \*\* bande de fixation large non disponible pour VenoTrain micro

Pour les pointures inférieures au 36 ou supérieures au 46, ainsi que pour les particularités anatomiques du pied, il est recommandé d'utiliser des produits sur mesure.



## Couvre 90 % des indications veineuses...

... avec 1 tableau des tailles

... et 3 lignes de produits : VenoTrain micro / VenoTrain business / VenoTrain soft & soft S

# Bas sur mesure à maillage circulaire



## Remboursement selon LiMA



*«prise en charge uniquement s'il est impossible de fournir un bas issu de la fabrication en série via un écart au niveau d'un point de mesure au minimum»*

## Patients qui ont besoin d'un bas sur mesure à maillage circulaire

- Très petite taille
- Très large taille
- Forme de jambe qui s'écarte considérablement de la norme

Chaque bas sur mesure est fabriqué individuellement pour chaque patient.

Prendre les mesures nécessite une solide expérience.

[https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/  
krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/  
Mittel-und-Gegenstaendeliste.html](https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html)



# Bas sur mesure à maillage circulaire



## Montant de remboursement LiMA

### Exemple bas mollet AD et bas cuisse AG

Liste des moyens et appareils (LiMA)							du 1 <sup>er</sup> janvier 2025	
No pos.	L	Dénomination	Quantité / Unité de mesure	MMR utilisation personnelle	MMR soins	Valable à partir du	Rév.	
17.02.01.01.1	L	Bas médical de compression du <b>mollet (A-D)</b> , classe de compression 2 (23-32mmHg), à maillage circulaire, <b>fabrication en série</b>  Limitation: • selon 17.02	1 paire	<b>70.01</b>	63.01	01.01.1996 01.04.2019 01.10.2021 01.01.2022 01.01.2024	N B,C P C B,P	
17.02.01.02.1	L	Bas médical de compression du <b>mollet (A-D)</b> , classe de compression 2 (23-32mmHg), à maillage circulaire, <b>sur mesure</b>  Limitation: • selon 17.02	1 paire	<b>178.66</b>	160.79	01.04.2019 01.10.2021 01.01.2022 01.01.2024	N P C,V B,P	
17.02.01.05.1	L	Bas médical de compression, <b>cuisse entière (A-G)</b> , classe de compression 2 (23-32mmHg), à maillage circulaire, <b>fabrication en série</b>  Limitation: • selon 17.02	1 paire	<b>100.57</b>	90.51	01.01.1996 01.04.2019 01.10.2021 01.01.2022 01.01.2024	N B,C P C B,P	
17.02.01.06.1	L	Bas médical de compression, <b>cuisse entière (A-G)</b> , classe de compression 2 (23-32mmHg), à maillage circulaire, <b>sur mesure</b>  Limitation: • selon 17.02	1 paire	<b>245.91</b>	221.32	01.04.2019 01.10.2021 01.01.2022 01.01.2024	N P C,V B,P	

<https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html>



# Aides enfilage



- gants en caoutchouc
- VenoTrain glider
- VenoTrain glider plus



Nouvelle vidéo de formation:



# Remboursement des aides à l'enfilage



**Les aides au glissement ou les cadres sont rémunérées par la LiMA s'ils ont été prescrits par le médecin avec justification.**



## Prescription de dispositifs d'aide à la mise en place

La rémunération des aides au glissement ou des cadres est prévue par la LiMA, sous réserve de faire l'objet d'une prescription motivée par un médecin. **Les gants spéciaux sont exclus de la rémunération.**

### Aide au glissement

- Motif :** le / la patient(e) n'est pas en mesure de mettre ou d'enlever ses bas de compression seul(e).

### Cadre / manchette circulaire

- Motif :** le / la patient(e) ne peut pas utiliser l'aide au glissement en raison d'une mobilité réduite.



<https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-leistungen-tarife/Mittel-und-Gegenstaendeliste.html>

# Problème d'ajustement : le bas est trop long !



Même taille de produit  
sur les deux jambes...

Jambe gauche :  
Bas mis et distribué  
**avec un gant en  
caoutchouc**

# Qui a besoin de bas tricotage à plat?



**Ce n'est pas seulement le diagnostic qui décide!**

**L'anatomie est également importante :**

- Changements de grande circonférence sur un membre
- Plis tissulaires encastrés

## ***Indications pour les bandages compressifs à maillage rectiligne selon LiMA***

*Lymphoedème (stades 2-3) • Lymphoedème avec une composante artérielle (MAOP) • Oedème du bas abdomen/génital • Oedème de la paroi thoracique/poitrine • Lipoedème (stades 2-3) • Lipo-lymphoedème (stades 2-3) • Phlébo-lymphoedème (stades 2-3) • Oedème causé par l'inactivité lorsque la forme ou le volume de la jambe le nécessite • Oedème chronique après un geste de revascularisation • Insuffisance veineuse chronique aux stades C5/6, si un produit à maillage circulaire n'est pas possible en raison de la masse de la jambe • Insuffisance veineuse chronique chez les patients immobilisés à long terme • Prise en charge d'une chéloïde • Traitement des cicatrices après brûlures, brûlures dues à un ébouillement ou interventions chirurgicales.*



Choix non-adapté


Bas de  
compression à  
maillage  
circulaire...



# Machine à tricoter la compression médicale



## Tricot circulaire forme cylindrique

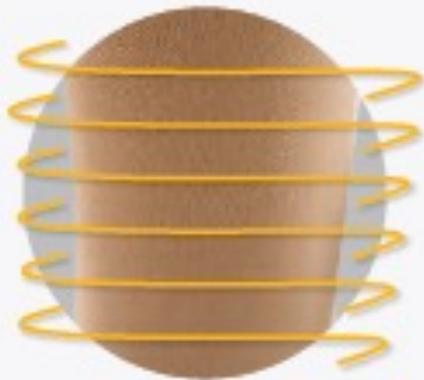

## Tricot plat (rectiligne)



# Limitations en vertu de la LiMA

## La prescription médicale



### RECOMMANDATIONS POUR LA PRESCRIPTION

#### LA PRÉSCRIPTION MÉDICALE

Le traitement par bas de compression médicaux (BCM) à maillage circulaire fait partie des soins de base en Suisse. En général, les caisses-maladie prennent en charge le montant indiqué dans la liste des moyens et appareils (LiMA) en vigueur. **Les bas de compression de la classe 1 ne sont pas des prestations obligatoirement prises en charge par l'assurance obligatoire des soins.** Pour des raisons d'observation, la classe de compression 1 peut aussi faire l'objet d'un remboursement après consultation du médecin-conseil et en cas d'indication.

Afin de déterminer le numéro LiMA adapté pour la prescription, les assureurs-maladie ont besoin que figurent sur l'ordonnance les quatre informations suivantes concernant le bas de compression :

- **Indication**
- **Bas en série ou bas sur mesure**
- **Modèle** : bas hauteur mollet (AD), bas hauteur cuisse (AG), etc.
- **Classe de compression**

#### Indications et limitations en vertu de la LiMA

BCM à maillage circulaire de classe 2 23–32 mmHg	BCM à maillage circulaire de classe 2 23–32 mmHg	BCM à maillage circulaire de classe 3 et 4 >34 mmHg	Système de bas de compression pour le traitement de l'ulcère veineux 1 ensemble comprenant 1 bas et 2 parties inférieures
<b>Indications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utilisation postopératoire après intervention orthopédique</li> <li>• Utilisation postopératoire après intervention au niveau des ganglions lymphatiques</li> </ul>	<b>Indications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syndrome douloureux des membres inférieurs d'origine veineuse (stades C1, C2, C3 d'après la classification CEAP)</li> <li>• Insuffisance veineuse chronique aux stades avancés (C3, C4a, C4b, C5, C6)</li> <li>• Lymphoedème stade 1</li> <li>• Oedème d'origine cardiogène ou autres oedèmes ayant une cause interstitielle</li> <li>• Oedème causé par l'inactivité</li> <li>• Oedème posttraumatique</li> </ul>	<b>Indications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Insuffisance veineuse chronique dans les stades avancés (C3, C4a, C4b, C5, C6)</li> </ul>	<b>Indications</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulcère veineux (stade C6)</li> <li>• Insuffisance veineuse chronique, stade C5, lorsqu'un état cutané particulièrement vulnérable l'exige et que des bas médicaux de contention (selon les chapitres 17.02 à 17.03) ne peuvent pas être utilisés</li> </ul>
<b>Quantité</b> 1 paire de bas de compression par an* au maximum.	<b>Quantité</b> 2 paires de bas de compression par an* au maximum. En cas d'utilisation unilatérale et utilisation de collants: 2 pièces par an au maximum. Maximum 2 paires de bas de compression par an*.		<b>Quantité</b> 2 ensembles par jambe atteinte et par année*.

#### À maillage circulaire, sur mesure:

prise en charge uniquement s'il est impossible de fournir un bas issu de la fabrication en série via un écart au niveau d'un point de mesure au minimum.

#### PRESCRIPTION DE DISPOSITIFS D'AIDE À LA MISE EN PLACE

La rémunération des aides au glissement ou des cadres est prévue par la LiMA, sous réserve de faire l'objet d'une prescription motivée par un médecin. Les gants spéciaux sont exclus de la rémunération.

\* voir LiMA chapitre 4.6, « par an », « prorata » et « par année civile »

### PRESCRIPTION MÉDICALE

Bas / Collants de compression médicaux à maillage circulaire

Patient(e)     
Nom Prénom Date de naissance

Indication

Utilisation  Bas standard / en série  Bas sur mesure

#### Modèle

- |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Bas mollet   | <input type="checkbox"/> Bas cuisse   | <input type="checkbox"/> Collant  | <input type="checkbox"/> Collant maternité  | <input type="checkbox"/> Bas cuisse fixation à la hanche                            |
|  |  |  |  |  |
| AD  | AG  | AT  | ATU   | AGHB  |
| <input type="checkbox"/> CCL 1  |
| <input type="checkbox"/> CCL 2  |
| <input type="checkbox"/> CCL 3  |
| <input type="checkbox"/> CCL 4  |

Nombre paire(s)

Nombre de pièce(s)

Kit ulcère veineux



Nombre de kits

#### DISPOSITIFS D'AIDE À LA MISE EN PLACE

- Gants en caoutchouc spéciaux
- Aide au glissement  Motif : le / la patient(e) n'est pas en mesure de mettre ou d'enlever ses bas de compression seul(e).
- Cadre / manchette circulaire  Motif : le / la patient(e) ne peut pas utiliser l'aide au glissement en raison d'une mobilité réduite.

Prescription de la gamme de produit :

Motif :

Nom du médecin / Numéro RCC :

Date

Signature du médecin

Sceau du cabinet / Adresse du médecin

#### Remarque à destination du patient/de la patiente

Le patient / la patiente n'est pas tenu(e) d'acheter des produits Bauerfeind. Le patient / la patiente décide librement quels moyens auxiliaires acheter et auprès de quel point de remise. Si pour des raisons médicales le médecin a nommément inscrit un produit dans la prescription, le point de remise ne peut modifier le produit qu'après concertation avec le médecin traitant.

# Limitations en vertu de la LiMA

## La prescription médicale

### PRESCRIPTION DE BAS DE COMPRESSION À TRICOTAGE RECTILIGNE SUR MESURE\*

Les bas de compression à tricotage rectiligne sont tricotés à plat sur des machines spéciales conformément aux mensurations des patients précisément mesurées et se différencient par le nombre de mailles. Une fois élaborées, les différentes pièces sont cousues ensemble. Il est ainsi possible de prendre en charge des membres présentant de grandes différences de circonférence. Le tissu du tricot est moins élastique que celui du tricot circulaire et offre, en fonction de la gamme de produits et du matériau, une pression de travail élevée et un engorgement de l'œdème fiable à la suite d'une thérapie par décongestion.

Les bas de compression médicaux sur mesure à tricotage rectiligne figurent dans la liste des moyens et appareils (LiMA), plus précisément au chapitre 17.15 en tant que bandages compressifs sur mesure, à maillage rectiligne.

No pos. LiMA	Dénomination
17.15.01.00.1	Bandage compressif pour la jambe (sans / avec pelotes), sur mesure, à maillage rectiligne
17.15.02.00.1	Bandage compressif pour la main (sans / avec pelotes), sur mesure, à maillage rectiligne
17.15.03.00.1	Bandage compressif pour le bras (sans / avec pelotes), sur mesure, à maillage rectiligne
17.15.04.00.1	Bandage compressif pour le tronc (sans / avec pelotes), sur mesure, à maillage rectiligne
17.15.05.00.1	Bandage compressif pour la tête / le cou (sans / avec pelotes), sur mesure, à maillage rectiligne

#### Limitations en vertu de la LiMA : indications

- Lymphoœdème (stades 2-3)
- Lymphoœdème avec une composante artérielle (MAOP)
- Œdème du bas abdomen / génital
- Œdème de la paroi thoracique / poitrine
- Lipœdème (stades 2-3)
- Lipo-lymphoœdème (stades 2-3)
- Phlébo-lymphoœdème (stades 2-3)
- Œdème causé par l'inactivité lorsque la forme ou le volume de la jambe le nécessite
- Œdème chronique après un geste de revascularisation
- Insuffisance veineuse chronique aux stades C5 / 6, si un produit à maillage circulaire n'est pas possible en raison de la masse de la jambe
- Insuffisance veineuse chronique chez les patients immobilisés à long terme
- Prise en charge d'une chéloïde
- Traitement des cicatrices après brûlures, brûlures dues à un ébouillement ou interventions chirurgicales

Le remboursement des bas de compression en tricot à plat se base sur le tarif ASTO de l'organisation Ortho Reha Suisse (ORS). Vous pouvez trouver le tarif ASTO actuel sur le site : [www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs](http://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs)  
Pour le décompte des prestations, ces informations sur le produit sont pertinentes :

- Prescription d'un bas de compression sur mesure, tricotage rectiligne par le médecin
- Prescription de la compression avec mention de l'indication par le médecin
- Número LiMA
- Número tarif ASTO de l'article dans la prise en charge pour le décompte par le revendeur spécialisé et / ou la prescription

#### Prescription d'aides d'enfilage

Le remboursement des aides au glissement ou des cadres chausse-bas est prévu dans la LiMA s'ils ont été prescrits par un médecin, avec la justification correspondante. Les gants d'enfilage ne sont pas remboursés.

#### Prescription des produits de marque :

Il est possible de prescrire un produit d'une marque spécifique sur justification médicale. Un espace est prévu au bas de la fiche de prescription pour justifier chaque prescription.

\* Mise à jour des informations : mars 2023

Source concernant les informations de la LiMA sur le site de l'OFSP : <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung/leistungstarife/Mittel-und-Gegenstandsliste.html>

Source concernant les informations du tarif ASTO sur le site de l'organisation ORS : <https://orthorehasuisse.ch/uber-den-ors/svot-tarif/>

### PRESCRIPTION MÉDICALE Tricotage rectiligne sur mesure



#### PATIENT

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_ Date de naissance \_\_\_\_\_

Utilisation  Bandages compressifs sur mesure, tricotage rectiligne

N° LiMA :  17.15.01.00.1 Jambe  17.15.02.00.1 Main  17.15.03.00.1 Bras  17.15.04.00.1 Tronc  17.15.05.00.1 Tête / cou

Compression avec plusieurs produits  oui  non  
Côté du corps  gauche  droit  deux côtés  
Classe de compression  Ccl 1  Ccl 2  Ccl 3  Ccl 4

Indication  Lymphoœdème (stades 2-3)  Œdème causé par l'inactivité lorsque la forme ou le volume de la jambe le nécessite  Insuffisance veineuse chronique  Lymphoœdème avec une composante artérielle (MAOP)  Œdème chronique après un geste de revascularisation  Prise en charge d'une chéloïde  Traitement des cicatrices après brûlures, brûlures dues à un ébouillement ou interventions chirurgicales  Œdème du bas abdomen / génital  Insuffisance veineuse chronique aux stades C5 / 6, si un produit à maillage circulaire n'est pas possible en raison de la masse de la jambe  Œdème de la paroi thoracique / poitrine  Lipo-lymphoœdème (stades 2-3)  Phlébo-lymphoœdème (stades 2-3)  Autres : \_\_\_\_\_

#### Modèle / Exécution

Couvre-orteils	Chaussette	Bas mollet	Bas mi-cuisse	Bas cuisse	Collant	Legging	Bermuda
Quantité : (nécessite ordonnance) <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Short	Hémicollant	Jambière	Manchon	Gant	Manchon avec main	Autre modèle, remarques complémentaires : _____	
Quantité : (nécessite ordonnance) <input type="checkbox"/>							

#### Aides d'enfilage

- Gants en caoutchouc spéciaux
- Aide au glissement
  - Motif : \_\_\_\_\_  
le / la patient(e) n'est pas en mesure de mettre ou d'enlever ses bas de compression seul(e).
  - Cadre / manchette circulaire
    - Motif : \_\_\_\_\_  
le / la patient(e) ne peut pas utiliser l'aide au glissement en raison d'une mobilité réduite.

#### Prescription de la gamme de produit :

\_\_\_\_\_

Motif : \_\_\_\_\_

Numéro RCC \_\_\_\_\_

Cacher du cabinet médical / Adresse du médecin \_\_\_\_\_

Date, Signature du médecin \_\_\_\_\_

REMARQUE À DESTINATION DU PATIENT/DE LA PATIENTE : Le patient / la patiente n'est pas tenu(e) d'acheter des produits Bauerfeind. Le patient / la patiente décide librement quels moyens auxiliaires acheter et auprès de quel point de vente. Si pour des raisons médicales le médecin a recommandé un produit dans la prescription, le point de vente ne peut modifier le produit au après consultation avec le médecin traitant.

# La prescription médicale

## exemple prescription patient IVC



### PRESCRIPTION MÉDICALE

#### Tricotage rectiligne sur mesure

**PATIENT**

Safi \_\_\_\_\_ Fatma \_\_\_\_\_ 13/03/2025 \_\_\_\_\_  
 Nom Prénom Date de naissance

**Utilisation**  Bandages compressifs sur mesure, tricotage rectiligne

**N° LIMA :**  17.15.01.00.1 Jambe  
 17.15.02.00.1 Main  
 17.15.03.00.1 Bras  
 17.15.04.00.1 Tronc  
 17.15.05.00.1 Tête / cou

**Compression avec plusieurs produits**  oui  non

**Côté du corps**  gauche  droit  deux côtés

**Classe de compression**  Ccl1  Ccl2  Ccl3  Ccl4

**Indication**

<input type="checkbox"/> Lymphœdème (stades 2-3) <input type="checkbox"/> Lymphœdème avec une composante artérielle (MAOP) <input type="checkbox"/> Œdème du bas abdomen / génital <input type="checkbox"/> Œdème de la paroi thoracique/poitrine <input type="checkbox"/> Lipœdème (stades 2-3) <input type="checkbox"/> Lipo-lymphœdème (stades 2-3) <input type="checkbox"/> Phlébo-lymphœdème (stades 2-3)	<input type="checkbox"/> Œdème causé par l'inactivité lorsque la forme ou le volume de la jambe le nécessite <input type="checkbox"/> Œdème chronique après un geste de revascularisation <input checked="" type="checkbox"/> Insuffisance veineuse chronique aux stades C5 / 6, si un produit à maillage circulaire n'est pas possible en raison de la masse de la jambe	<input type="checkbox"/> Insuffisance veineuse chronique chez les patients immobilisés à long terme <input type="checkbox"/> Prise en charge d'une chéloïde <input type="checkbox"/> Traitement des cicatrices après brûlures, brûlures dues à un ébouillement ou interventions chirurgicales <input type="checkbox"/> Autres : _____
--	---	--

**Modèle / Exécution**

Couvre-orteils	Chaussette	Bas mollet	Bas mi-cuisse	Bas cuisse	Collant	Legging	Bermuda

Quantité : (veuillez cocher)      2

						Autre modèle, remarques complémentaires : _____ _____ _____
Short	Hémicollant	Jambière	Manchon	Gant	Manchon avec main	

Quantité : (veuillez cocher)

**Aides d'enfilage**

Gants en caoutchouc spéciaux  
 Aide au glissement  
 Motif : \_\_\_\_\_  
 le / la patient(e) n'est pas en mesure de mettre ou d'enlever ses bas de compression seule(s).

Cadre / manchette circulaire  
 Motif : \_\_\_\_\_  
 le / la patient(e) ne peut pas utiliser l'aide au glissement en raison d'une mobilité réduite.

**Prescription de la gamme de produit :**

Curaflow \_\_\_\_\_

Motif : acceptance \_\_\_\_\_

Numéro RCC \_\_\_\_\_

Cachet du cabinet médical / Adresse du médecin \_\_\_\_\_ Date, Signature du médecin \_\_\_\_\_

REMARQUE À DESTINATION DU PATIENT/DE LA PATIENTE : Le patient / la patiente n'est pas tenu(e) d'acheter des produits Bauerfeind. Le patient / la patiente décide librement quels moyens auxiliaires acheter et auprès de quel point de remise. Si pour des raisons médicales le médecin a normalement inscrit un produit dans la prescription, le point de remise ne peut modifier le produit qu'après concertation avec le médecin traitant.

→ BAUERFEIND.CH

# Insuffisance veineuse chronique stade C4/5

## Lymphoedème Stade 2 - 3

Mise d'en place d'un collant- Bandages compressif tricotage rectiligne sur mesure



# Indication pour tricotage rectiligne

## Lymphoedème unilatéral Stade 2



Mise d'en place d'un bas cuisse AG avec cape d'orteil



# Lymphoedème généralisé Stade 2



Mise d'en place d'un collant- Bandages compressif tricotage rectiligne sur mesure





**MERCI DE VOTRE ATTENTION**

**DISCUSSION & QUESTIONS**



MOTION IS LIFE.